


教室でEduMic（エデュマイク）を装着してくださる先生方へ


EduMicは、距離がある、反響する、雑音があるというような補聴器だけでは先生の声が聞き取りにくい状況で、先生の胸元にマイクを装着していただくことで、補聴器を使っている子供たちが先生の声を聞きやすくする2.4GHzワイヤレス補聴援助システムです。

先生にお願いしたい正しい装着方法

マイク上面が口元を向いていて、マイク上面から口元までの距離が最大20cmになるようにしてください。

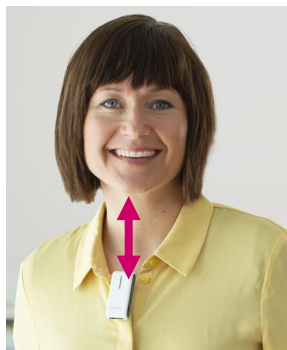

クリップ留めの場合

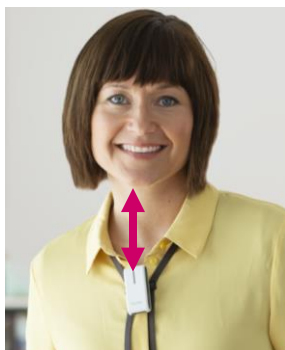


ネックストラップの場合



子どもたちにより良い聞こえを届けるためにご協力をお願いいたします


話す

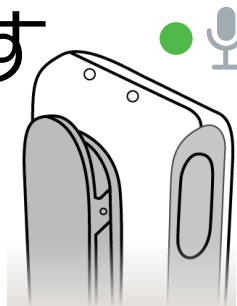

緑のランプはマイクモードです。

マイクを装着した先生の声が子供たちに届きます。

消音

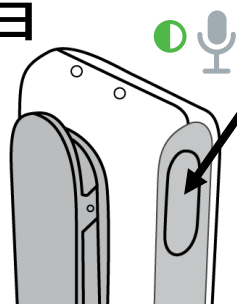

緑のランプ点滅は消音モードです。

プッシュボタンを2秒押すと、先生が装着したマイクがミュートになります。

【どのような時に使うか】

先生の話が終わり、子どもたち同士で話す場合など、しばらく先生の声が届ける必要がなくなった時に使います。

【消音モードにした時の注意点】

再び先生が話す時には、もう一度プッシュボタンを短く押してください。

使用する時のコツ：



子どもたちの最適な学習ためには、EduMicを使った先生の声はもちろん、補聴器のマイクから聞こえる周囲のお友達の声も同時に重要です。EduMicとペアリングしている補聴器は、EduMicを使用している間も周りのお友達の声も届けるように設定されていますが、誰かが発言する時は周りの子どもたちに出来るだけ静かにしていただくなど、「今誰の声を集中して聞いてほしいか」という意識をもっていただくと、使いやすくなると思います。

教室でスピーカーからの音を聴く時




ジャックモード

先生の手元にあるノートパソコン、教室にあるサウンドフィールドシステムとEduMicを同梱の音声入力ケーブルで接続することで、外部音源からのオーディオ入力が直接補聴器にストリーミングされます。

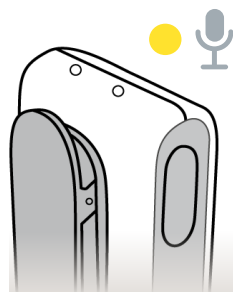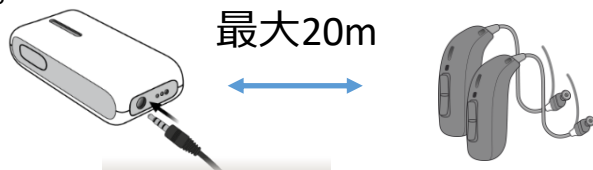

黄色のランプはジャックモードです。


マイクに同梱のジャックケーブルを挿すと自動でジャックモードに切り替わります。
ケーブルを抜くとマイクモードに戻ります。

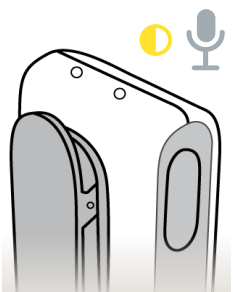

黄色のランプ点滅は消音モードです。

プッシュボタンを2秒押すと、ジャックケーブルを使って聞こえているオーディオストリーミングをミュートすることができます。

ミュート解除はボタンを短く押してください。

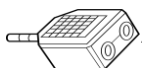

ジャックスプリッターアダプター

オーディオ音源をEduMicを使っている子どもだけでなく、その他の子どももスピーカー等から同時に聞けるようにするには、市販のジャックスプリッターアダプタを使います。

🎧	状態表示ランプ	
🟦	青色点滅	ペアリング中
⬜	白色点灯	起動
🟢	緑色点灯	電源オン/マイクモード
🟢	緑色点滅	マイクモードで消音
🟡	黄色点灯	ジャック/FMモード
🟡	黄色点滅	ジャック/FMモード消音
🔴	赤色点滅	ペアリング解除
🟣	マゼンダ色点灯	テレコイルモード
🟣	マゼンダ色点滅	テレコイルモード消音

🔋	電源ランプ	
⬜	白色点灯	起動
🟢	緑色点灯	フル充電
🟡	黄色点滅	充電中
🔴	赤色点滅	電池容量低下



oticon
life-changing technology