

オーティコンコネクティビティでコンサートを楽しむためには

オーティコンコネクティビティでコンサートを楽しんでいただくために、使用する外部機器に合わせて設定が必要です。コンサート当日までに設定の上、動作を確認されることをお勧めいたします。

① OpnS、Ruby、Xceed、Xceed Play、Opn Play、Opn、Siya シリーズで 2.4GHz 搭載の補聴器をお使いの方

接続する機器により接続方法と操作が異なります。


互換性に関する情報は <https://www.oticon.co.jp/hearing-aid-users/support/faq/compatibility> よりご確認ください。

A) iPhone®、iPad®、iPod touch® と接続する場合 . . . P2~3

補聴器と機器を直接接続します。P2 にお進みください。

B) Android スマートフォン、パソコンと接続する場合

接続には中継機として コネクトクリップ が必要です。P3 事前設定をした後、機器ごとの設定を行ってください。

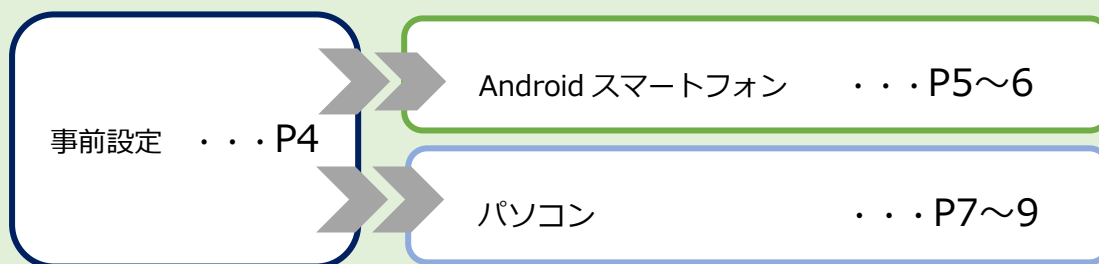

② Alta2、Nera2、Ria2、Alta、Nera、Ria シリーズなどのワイヤレス補聴器とストリーマープロをお使いの方

接続する機器と接続方法により操作が異なります。

接続機器と接続方法をお選びいただき、該当するページにお進みください。

A) iPhone®、Android など各種携帯電話と接続する場合 . . . P10

B) パソコン (Windows10) と ワイヤレス 接続する場合 . . . P11~13



// 有線 接続する場合 . . . P14

補聴器 × iPhone[®]、iPad[®]、iPod touch[®]



iOS のバージョンにより表示が異なる場合がございます。また、全てのアプリとの動作を保証するものではありません。

<設定方法>


- ① 「設定」を選択します。
- ② 「アクセシビリティ」を選択します。
- ③ 「ヒアリングデバイス」を選択します。

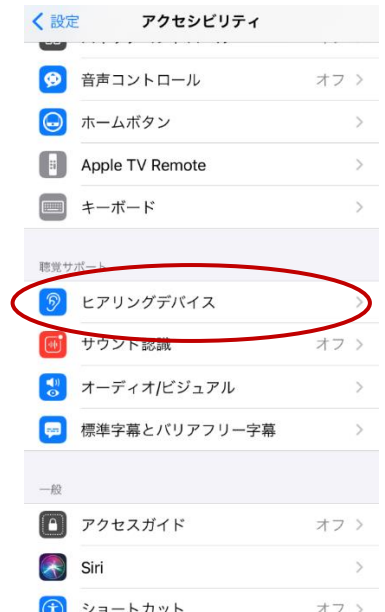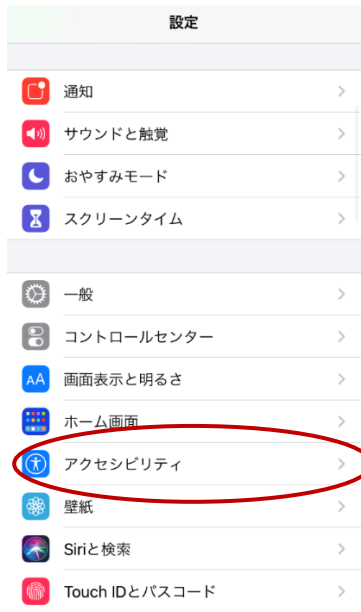


- ④ 補聴器の電池蓋を開け閉めします。iPhone[®]のペアリング準備ができるまで約3分お待ちください。
- ⑤ 補聴器を検索します。
※検索中のみ表示が出ない場合は、端末再起動後に再度お試しください。
- ⑥ 補聴器の表示が出たら、選択します。

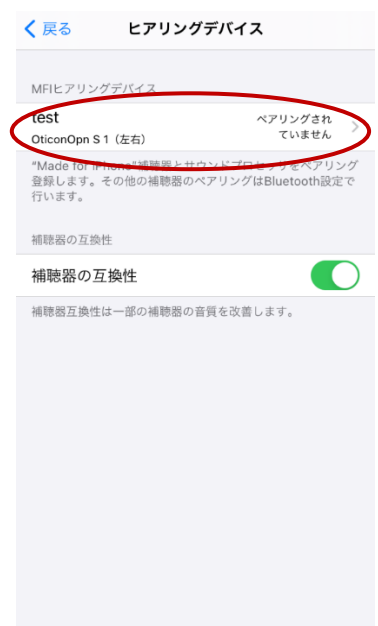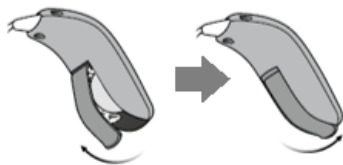

⑦ 「ペアリング」を選択します。
両耳の場合は2回表示が出ます。

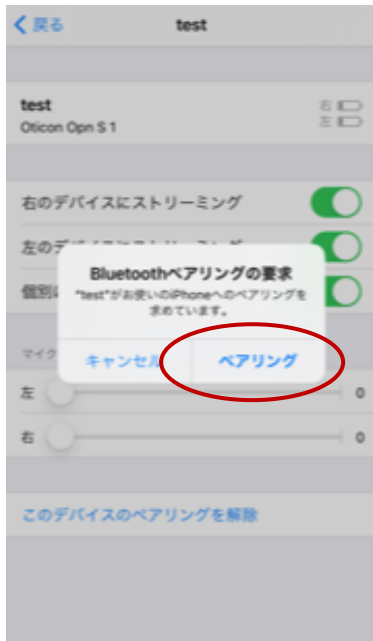

⑧ 電池残量マークが表示されれば、
設定完了です。

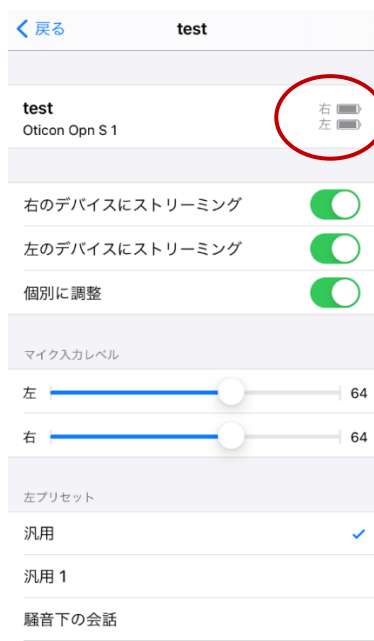

<ご使用方法>

◆ 音楽を聞く


端末側で動画や音楽を再生すると補聴器から直接音声聞こえます。

音量が小さい場合は、端末側でボリュームを上げてください。

補聴器 × コネクトクリップ 事前設定

外部機器と接続するための事前設定として、補聴器とコネクトクリップをペアリングする必要があります。以下の手順で操作をおこなってください。


1. コネクトクリップの電源表示ランプが消灯するまでマルチボタンを約 6 秒押し続け、電源をオフにします。

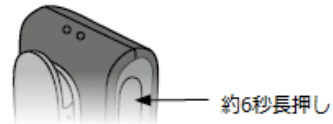


2. 補聴器の電池蓋を開けて電源をオフにしたあと、電池蓋を閉めて電源をオンにします。電源が入ると、補聴器は 3 分間ペアリングモードになります。ペアリングモード中に次の 3～6 の手順を行ってください。




3. コネクトクリップの電源表示ランプが緑色（点灯）になるまでマルチボタンを約 3 秒押し続け、電源をオンにします。

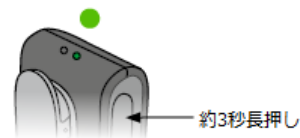


4. コネクトクリップが補聴器の検出を始めます。この時、コネクトクリップの状態表示ランプは黄色（点滅）に光ります。

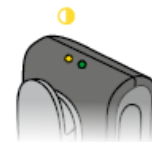

5. コネクトクリップと補聴器を近くに置きます（20cm まで）。

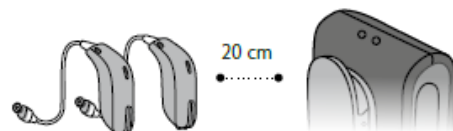

6. コネクトクリップの状態表示ランプが黄色（点灯）になれば、補聴器のペアリングが完了です。

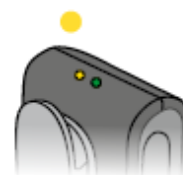


コネクタクリップ × Android スマートフォン

ご使用の Android 製品により画面の表示が異なる場合がございます。また、全ての機器・アプリとの動作を保証するものではありません。

＜設定方法＞


⑨ 「設定」を選択します。

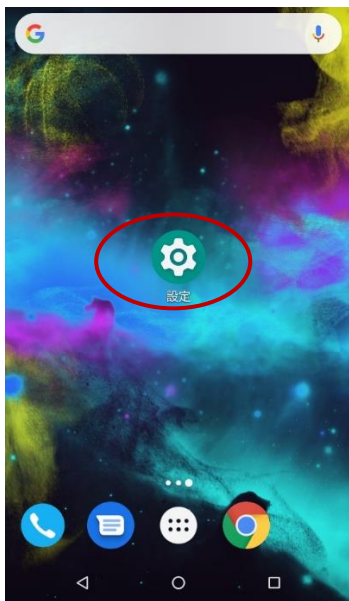


⑩ 「接続済みの端末」を選択します。



⑪ 「Bluetooth」を選択します。

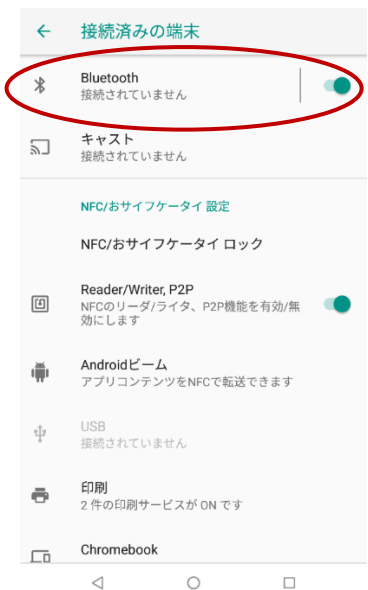

⑫ コネクタクリップのマルチボタンとボリューム（上）ボタンの両方を状態表示ランプが青色の点滅になるまで約 6 秒長押しし、コネクタクリップをペアリングモードにします（約 3 分）。

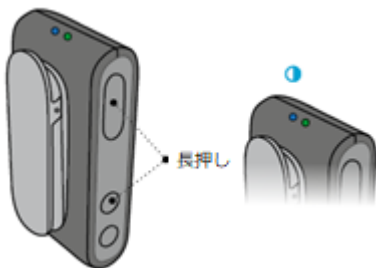


⑬ 「新しいデバイスとペア設定する」を選択します。



⑭ 「Connect Clip」を選択します。


※検索中そのまま表示が出ない場合は、端末再起動後に再度お試しください

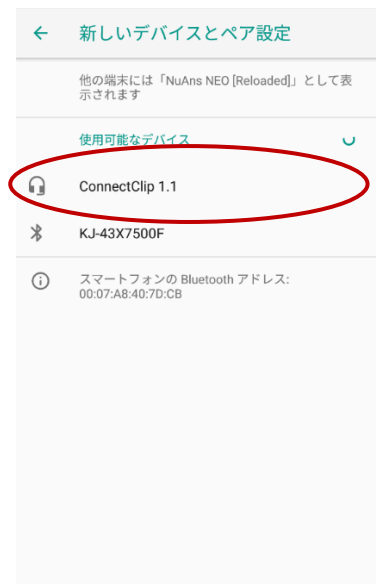

- ⑮ 「ペア設定する」を選択します。
※PINコードの要求が出た場合は、0000
(ゼロ4つ) 入力してください。



- ⑯ 「ペア設定したデバイス」に
Connect Clip の表示が出れば、
設定完了です。

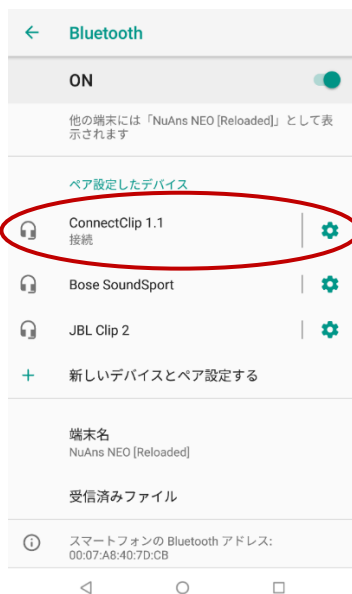

<ご使用方法>


◆ 音楽を聞く

端末側で動画や音楽を再生するとコネクトクリップを経由して補聴器から直接音声聞こえます。
音量が小さい場合は、端末、コネクトクリップいずれかでボリュームを上げてください。
ストリーミング中はコネクトクリップの状態表示ランプがオレンジ色に点灯します。



◆ 音楽の再生を止める

音楽再生を止めるには端末側で停止をするか、
コネクトクリップのマルチボタンを短く押します。
再度再生するには、端末側で再生します。

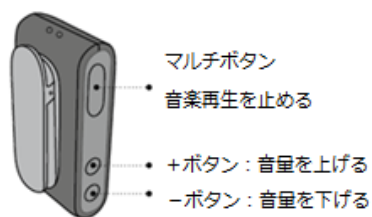

コネクトクリップ × パソコン (Windows10)

全ての機器・アプリとの動作を保証するものではありません。

<設定方法>


- ① 画面左下のスタートボタンをクリックし「設定」アイコンを選択します。




- ② 「デバイス」を選択します。




- ③ 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」を選択します。

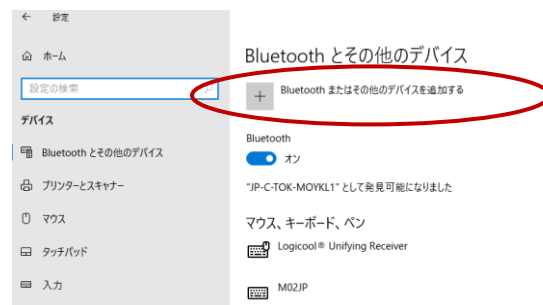

- ④ コネクトクリップのマルチボタンとボリューム
(上) ボタンの両方を状態表示ランプが青色の点滅になるまで約 6 秒長押しし、コネクトクリップをペアリングモードにします (約 3 分)。

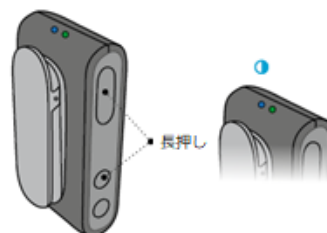

- ⑤ 「Bluetooth」を選択します。

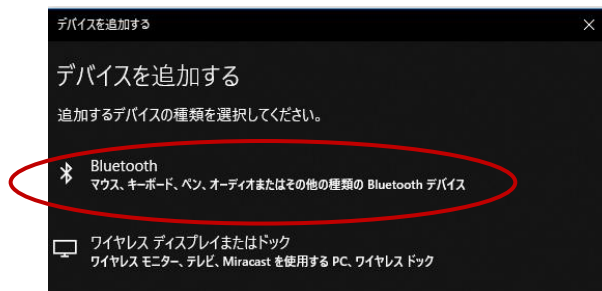


- ⑥ 「Connect Clip」を選択します。

※検索中そのまま表示が出ない場合は、端末再起動後に再度お試しください

※PIN コードの要求が出た場合は、0000（ゼロ4つ）入力してください



- ⑦ 「デバイスの準備が整いました！」の画面に「Connect Clip」の表示が出れば、設定完了です。「完了」を押して画面を閉じます。

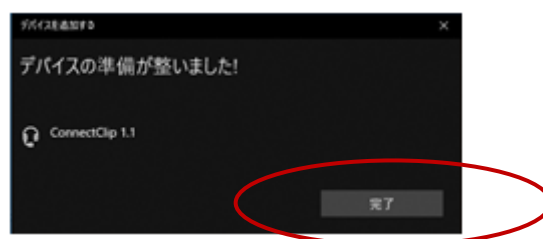

<ご使用方法>

◆ 音楽を聞く

端末側で動画や音楽を再生するとコネクトクリップを経由して補聴器から直接音声聞こえます。音量が小さい場合は、端末、コネクトクリップいずれかでボリュームを上げてください。ストリーミング中はコネクトクリップの状態表示ランプがオレンジ色に点灯します。



◆ 音楽の再生を止める

音楽再生を止めるには端末側で停止をするか、コネクトクリップのマルチボタンを短く押します。再度再生するには、端末側で再生します。



<トラブルシューティング>

パソコンからの音声が入力機器に聞こえない場合は、パソコンのサウンド設定の確認が必要になる場合がございます。以下の手順で設定をご確認ください。

- ① 画面左下のスタートボタンをクリックし「設定」アイコンを選択します。続いて表示される「Windows の設定」画面で「デバイス」を選択します。




- ② 「Bluetooth とその他のデバイス」画面で「サウンドの設定」を選択します。



- ③ 「出力デバイスを選択してください」の項目を選択します。



- ④ 「Headphones (Connect Clip Stereo)」を選択し、ボリュームをお好みの音量に設定します。

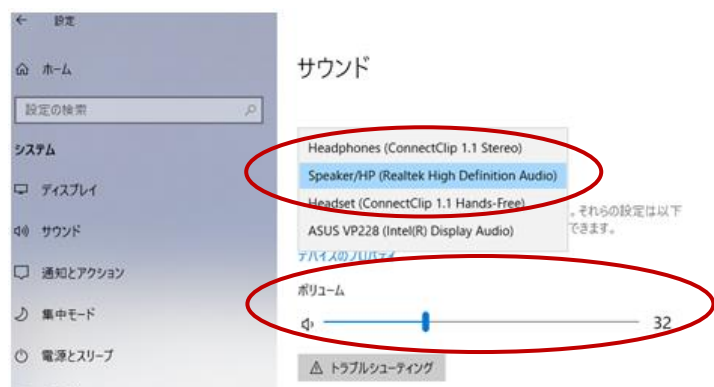

ストリーマープロ × 各種携帯電話

全ての機器・アプリとの動作を保証するものではありません。安定して音声を聞くためにストリーマープロを首にかけた状態でご使用ください。

<設定方法>

- ① ストリーマープロ上部中央の電源オン/オフボタンを約 5 秒間長押しして、ストリーマープロをペアリングモードにします。ペアリングモード中はストリーマープロの表示ランプが青色に点滅します。
- ② 接続を行う携帯電話など外部機器側をペアリングモードにします。
ペアリングを行う際には、接続する機器のメニューなどを探していただく、または起動方法を確認してください。ペアリングの実施方法については、実際にお使いになる携帯電話や外部機器側の取り扱い説明書を参照ください。一般に「ワイヤレス機器選択」や「ペアリング」などと記載されています。
- ③ 接続を行う機器によっては PIN コードの入力が求められる場合があります。
ストリーマープロの PIN コードは 0000（ゼロ 4 つ）です。
上記 PIN コードを入力すると、ストリーマープロと外部機器のペアリングは接続完了となります。
- ④ ペアリングが完了すると、ストリーマープロのペアリング状態を表す電源オン/オフ表示ボタンが青く点灯します。



<使用方法>

◆ 音楽を聞く

ストリーマープロの AUX セレクターを短く*押してから、外部機器側で動画や音楽を再生するとストリーマープロを経由して補聴器から直接音声が聞こえます。ストリーマープロの設定や接続する外部機器によっては、端末側で再生をするだけで補聴器から音が聞こえることがございます。音量が小さい場合は、外部機器、ストリーマープロのいずれかでボリュームを上げてください。

*既定の設定は短か押しです。長く押ししてしまいますとテレコイルモードに切り替わりますので、ご注意ください。



ストリーマープロ × パソコン ワイヤレス接続


全ての機器・アプリとの動作を保証するものではありません。安定して音声を聞くためにストリーマープロを首にかけた状態でご使用ください。

<設定方法>


- ① 画面左下のスタートボタンをクリックし「設定」アイコンを選択します。



- ② 「デバイス」を選択します。

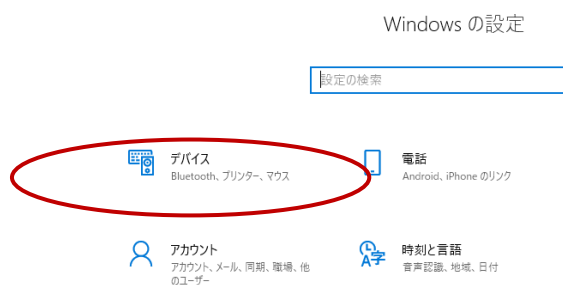


- ③ 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」を選択します。

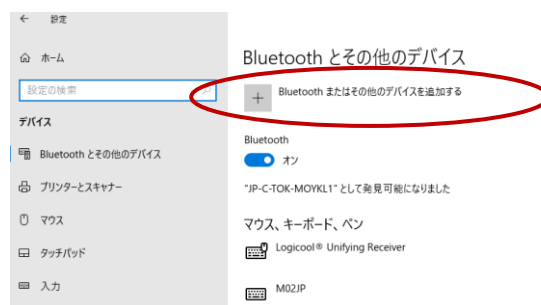

- ④ ストリーマープロ上部中央の電源オン/オフボタンを約 5 秒間長押しして、ストリーマープロをペアリングモードにします。ペアリングモード中はストリーマープロの表示ランプが青色に点滅します。




- ⑤ 「Bluetooth」を選択します。

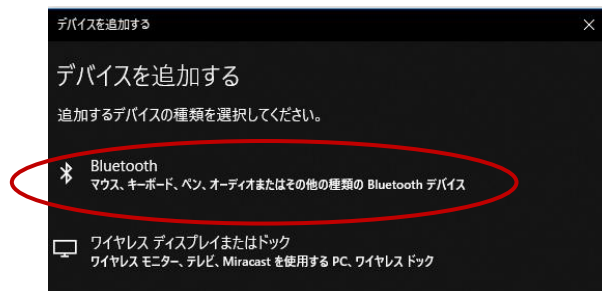

- ⑧ 「StreamerPro」を選択します。

※検索中そのまま表示が出ない場合は、端末再起動後に再度お試しください

※PIN コードの要求が出た場合は、0000（零を4つ）入力してください

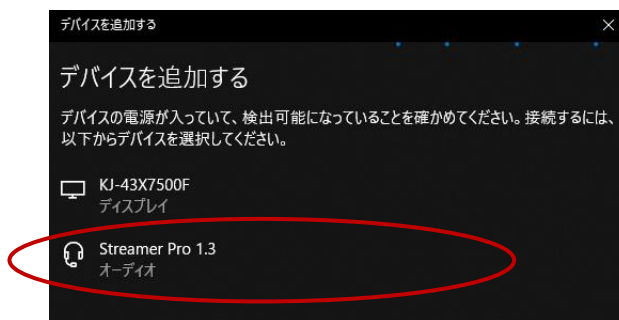

- ⑨ 「デバイスの準備が整いました！」の画面に「Streamer Pro」の表示が出れば設定完了です。「完了」を押して画面を閉じます。



<使用方法>

◆ 音楽を聞く

ストリーマープロのAUXセクターを短く*押してから、端末側で動画や音楽を再生するとストリーマープロを経由して補聴器から直接音声がかかります。ストリーマープロの設定や接続する外部機器によっては、端末側で再生をするだけで補聴器から音が聞こえることがございます。音量が小さい場合は、端末、ストリーマープロのいずれかでボリュームを上げてください。

*既定の設定は短か押しです。長く押ししてしまいますとテレコイルモードに切り替わりますので、ご注意ください。



<トラブルシューティング>

パソコンからの音声が補聴器に聞こえない場合は、パソコンのサウンド設定の確認が必要になる場合がございます。以下の手順で設定をご確認ください。


- ① 画面左下のスタートボタンをクリックし「設定」アイコンを選択します。続いて表示される「Windows の設定」画面で「デバイス」を選択します。




- ② 「Bluetooth とその他のデバイス」画面で「サウンドの設定」を選択します。



- ③ 「出力デバイスを選択してください」の項目を選択します。

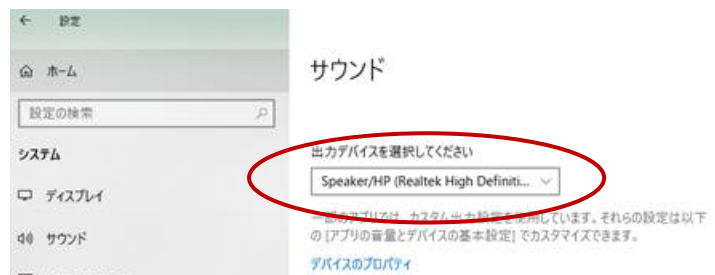

- ④ 「Headphones (streamer Pro Stereo)」を選択し、ボリュームをお好みの音量に設定します。

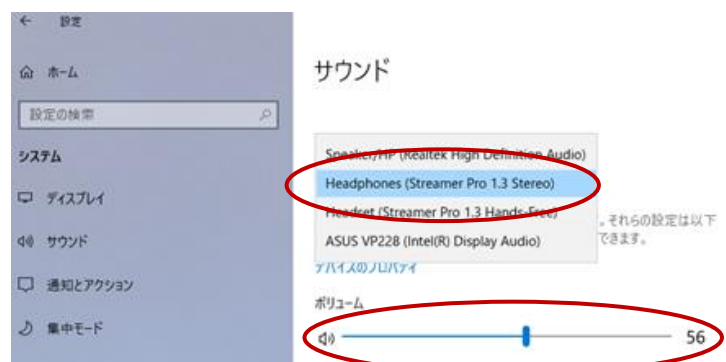


ストリーマープロ × パソコン 有線接続 (Windows10)

全ての機器・アプリとの動作を保証するものではありません。安定して音声を聞くためにストリーマープロを首にかけての状態でご使用ください。

<設定方法>

付属している 3.5 mm ミニジャックケーブルをストリーマープロとパソコンに接続します。

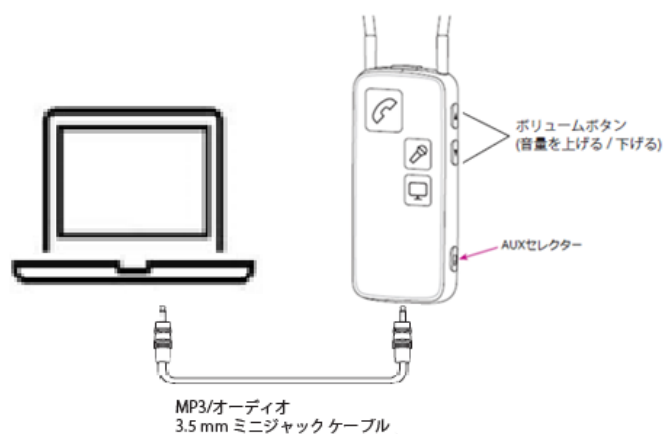

<使用方法>

◆ 音楽を聞く

ストリーマープロの AUX セレクトターを短く*押してから、端末側で動画や音楽を再生するとストリーマープロを経由して補聴器から直接音声が聞こえます。ストリーマープロの設定や接続する外部機器によっては、端末側で再生をするだけで補聴器から音が聞こえることがございます。音量が小さい場合は、端末、ストリーマープロのいずれかでボリュームを上げてください。

*既定の設定は短か押しです。長く押ししてしまいますとテレコイルモードに切り替わりますので、ご注意ください。

