

クイックガイド

Oticon Companion アプリと Apple Watchとを一緒にお使いいただくには

Apple WatchでOticon Companionアプリをインストール、ペアリング、コントロールする方法。

Apple Watchでは、音量調整、プログラム変更、補聴器の消音/消音解除、スピーチブースター機能のオン/オフ、リモートマイクのオフ、電池残量の確認などができます。

Apple Watchのコンプリケーション機能をご使用いただくこともでき、文字盤からアプリに素早くアクセスすることができます。

ご利用前に

Apple WatchでOticon Companionアプリをご使用いただく前には、iPhoneにCompanionアプリをインストールし、補聴器がiPhoneとがペアリングされていることを確認いただく必要があります。

システム要件

アプリをApple Watchと一緒にご利用いただくには、以下の要件が必要です：

- Apple Watchシリーズ 4またはそれ以降
- watchOS 8またはそれ以降



QRコードをスキャンして、
App StoreからOticon
Companionアプリをダウン
ロードいただけます。



Download on the
App Store

Made for
iPhone | Apple Watch

Apple, Apple のロゴ、iPhone、iPad、Apple Watchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

CompanionアプリをApple Watchで使用するには


ここでは、Apple WatchでOticon Companionアプリの使用を開始する方法をご紹介します。



まず、iPhoneのApp Storeから「**Oticon Companion**」アプリをダウンロードし、補聴器とiPhoneをペアリングします。



Watchアプリを開き「**マイウォッチ**」タブをタップします。

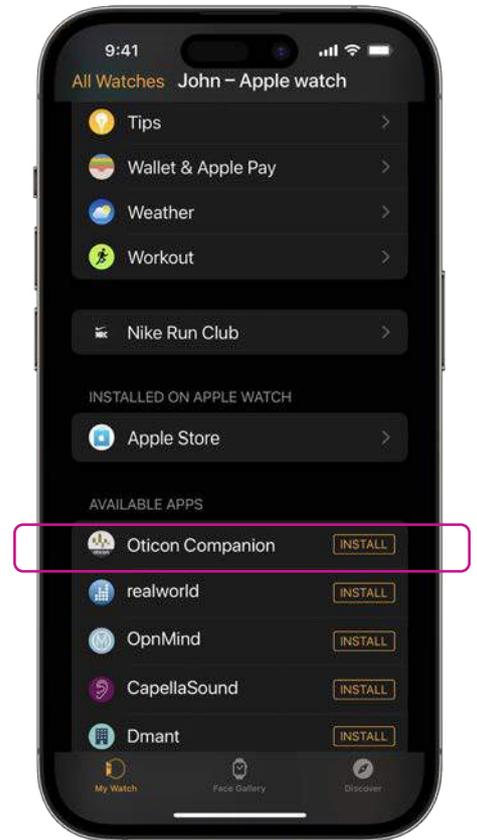

下にスクロールしてOticon Companionアプリが「利用可能な App」セクションに表示されたら、アイコンの右側に表示された「インストール」をクリックします。これで、アプリがApple Watchにインストールされます。

Apple WatchでOticon Companionアプリの主な機能を使う

Apple Watchの「Oticon Companion」アプリのアイコンをタップしてアプリを開きます。



電池残量をチェック

Oticon Companionアプリの一般画面から、右にスワイプすると、補聴器の電池残量が表示されます。



一般画面

Oticon Companionアプリの一般画面は、プログラムの変更、音量の調整、補聴器の消音ができます。



スピーチブースター

Oticon Companionアプリの「一般」画面から、左にスワイプすると、スピーチブースターのオン/オフ、またはリモートマイクをオフにできます。

プログラムアイコン(P1)をタップして、プログラム画面が表示されます。
プログラムをスクロールして、**選択したいプログラムをタップ**します。
デジタルクラウンを回して、プログラムをスクロールすることもできます。




Apple Watchのコンプリケーションを設定する

ウォッチフェイスからアプリに素早くアクセスするために、Apple Watchのコンプリケーション*を設定することができます。これは、文字盤上でショートカットの役割を果たす、Apple Watchの便利な機能です。



マイ文字盤から文字盤を選択し、コンプリケーションまでスクロールダウンします。すべてのウォッチフェイスでコンプリケーションを追加できるわけではありませんのでご注意ください。

「左上」をタップしてショートカットを選択します。

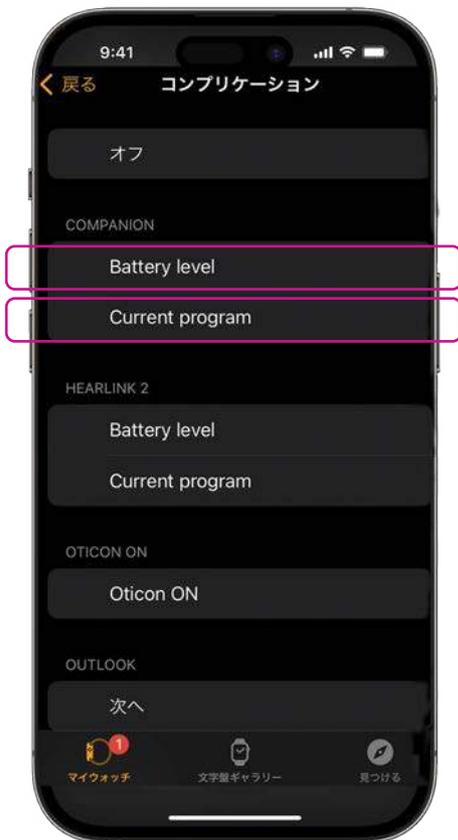

コンプリケーションをスクロールし、Oticon Companionアプリの下にある「電池残量」を選択します。

「右上」も同じ手順で[現在のプログラム]を選択します。



コンプリケーションが文字盤の画面上隅に表示されるようになりました。

* 選択した文字盤でコンプリケーションが利用可能な場合